

Herpese analüüsi proovivõtu juhend

Herpese analüüsi saab võtta ainult hetkel, kui Teil on herpesinfektsioonist tingitud vill või haavand. Proovi ei tohi võtta, kui villiline lööve paraneb ehk on kattunud koorikuga, kuna sellisel hetkel ei pruugi viirust enam haavandis olla ja analüüs võib anda vale (valenegatiivse) tulemuse. Analüüsi võtmiseks villist või haavandist on plastikust tuub, mille korki külge on kinnitatud uuringutampoon (peenike plastik toruke vatitampooniga).

Enne proovi võtmist pesta hoolikalt käed. Eemaldada tuubilt kork, mille külge on kinnitatud vatitampoon. Vatitampooni otsaga kraapida haavandi põhja 4-8 korda või koguda tampooni peale villi (de) sees olev vedelik. Seejärel asetada tampoon tagasi tuubi ning pakendada spetsiaalsesse kilekotti (pakendiga kaasas). Transpordikarp palun sulgeda turvakleebisega.

Proovivõtmise juhendi leiate ka proovivõtu komplektist.